



**« L'allaitement est la meilleure
prévention pour la santé de votre
enfant ! »**



Soin et protection pour les mères allaitantes

Pourquoi utiliser les anneaux de protection mammaire MamaSafe® ?

L'allaitement est la meilleure prévention pour la santé de votre enfant. Lorsque vos mamelons sont douloureux ou vous irritent, une aide immédiate s'impose pour que vous puissiez continuer à allaiter. Les anneaux de protection mammaire MamaSafe®, également appelés les « donuts de Vienne », favorisent le processus de cicatrisation des mamelons abîmés de façon simple et naturelle.

MamaSafe® évite aux mamelons de coller aux vêtements, laisse l'air circuler librement et favorise aussi bien la cicatrisation humide que sèche.



L'application en supplément d'une crème grasse sur les mamelons abîmés permet d'éviter la formation de croûtes.

Les anneaux de protection mammaire sont constitués de matériaux respirants et absorbants (coton et mousse) qui prennent soin de votre peau. Vous pouvez les jeter tout simplement avec les déchets ménagers.

Comment dois-je utiliser MamaSafe® ?

Placez les anneaux de protection mammaire MamaSafe® sur les seins de façon à ce que les mamelons se trouvent au centre.



Le marquage rouge ou bleu des anneaux MamaSafe® permet d'utiliser à chaque fois le même anneau pour le même sein et d'éviter ainsi les contaminations croisées.



Les anneaux MamaSafe® peuvent être aisément placés sous le soutien-gorge (ou le soutien-gorge d'allaitement) et favorisent ainsi le processus de cicatrisation des mamelons abîmés. Vous pouvez utiliser MamaSafe® lorsque vous ressentez une certaine sensibilité ou inflammation au niveau des mamelons, ou également tout au long de la période d'allaitement à titre préventif.

Recommandation d'utilisation des anneaux MamaSafe®!

Nous vous recommandons de changer les anneaux de protection mammaire MamaSafe® tous les jours. Pour des raisons d'hygiène, la réutilisation après nettoyage n'est pas conseillée.

Vous trouverez de plus amples informations ainsi qu'une vidéo d'utilisation sur le site internet www.mamasafe.at



Distributeur: Rudolf Heintel Ges.m.b.H.

Erdbergstraße 166, 1030 Vienne, Autriche

T: +43/1/403 89 56-0, F: +43/1/403 89 56-50

E: medizintechnik@heintel.at, I: www.heintel.at